



Productinformatie Semi- Orthopedische schoenen

**Met de grootste zorg,
passie en vakmanschap**

Van Gils Footcare gaat semi-orthopedische schoenen voor u maken. Semi-orthopedisch schoeisel is bedoeld voor lichtere voetklachten en is vergelijkbaar met een confectieschoen. Echter, deze schoen heeft extra ruimte voor een goed voetbed op maat. De schoenen kunnen we bestellen in verschillende lengte- en breedtematen.

Op weg naar uw nieuwe semi-orthopedische schoenen (OSB)



De eerste afspraak

U heeft een medische indicatie ontvangen van uw behandelend arts voor semi-orthopedische schoenen. Bij de eerste afspraak bespreken we samen met u uw klachten en doen we een zorgvuldig voetonderzoek. Tijdens deze eerste afspraak kiest u het model en de kleur van de schoen aan de hand van een modellenboek. Ook meten wij steunzolen op maat aan, die u zult dragen in uw semi-orthopedische schoenen.



De tweede afspraak

De levertijd voor de semi-orthopedische schoenen bedraagt 4-6 weken. Tijdens deze afspraak zal de pasvorm van de schoen, de functionaliteit en de op maat gemaakte steunzolen gecontroleerd worden. We horen dan natuurlijk graag wat uw eerste indruk is. Het zal waarschijnlijk even wennen zijn.



En daarna: inlopen van uw nieuwe schoenen

Om u te laten wennen aan het materiaal, de stand van de schoen en het voetbed en om tevens drukplekken te voorkomen is het van belang dat u het dragen van uw schoenen de eerste weken rustig opbouwt. U begint de eerste dag met een uur en bouwt per dag met een uur op. Na twee weken draagt u de schoenen de hele dag.

Maak bij het aan- en uittrekken van de schoenen de sluiting volledig los. Gebruik bij het aantrekken van de schoenen een schoenlepel om vervorming te voorkomen. Let erop dat u bij het aantrekken van de schoenen de sluiting weer stevig vastmaakt, om zo optimale steun en correctie te ervaren.

Wat we u verder **nog graag vertellen**



Wisselen

Uw schoenen gaan langer mee als u ze regelmatig wisselt met een ander paar schoenen. Schoenen nemen transpiratievocht op en moeten daarom af en toe 'luchten'. U komt 3 maanden na aanschaf van het allereerste paar schoenen in aanmerking voor een wisselpaar. U kunt dan regelmatig van schoenen wisselen waardoor u langer plezier heeft van uw schoenen. Wij adviseren om elke dag te wisselen van schoenen. Afhankelijk van uw zorgverzekering mag u na 15-18 maanden het eerste paar vervangen, zo heeft u altijd 2 paar adequate schoenen



Onderhoud en reparatie

Regelmatig poetsen (minimaal 1 keer per 2 weken) houdt het leer van uw schoenen mooi en soepel. Voor het poetsen van glad leer gebruikt u een schoen crème. Suède en nubuck kunt u borstelen met een suèdeborstel of nubuckblokje. Daarna spuit u de schoenen in met een beschermende spray. Zet uw schoenen nooit bij of op de verwarming, maar laat ze drogen bij kamertemperatuur. Heeft u last van transpirerende voeten? Was dan elke dag uw voeten en trek schone katoenen of wollen kousen/sokken aan.

Laat de hakken en/of zolen van uw semi-orthopedische schoenen op tijd vervangen. Doorlopen op versleten hakken of zolen kan onherstelbare schade aan de schoenen aanrichten.



Vergoeding

Semi-orthopedische schoenen worden vergoed vanuit de basisverzekering, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan. Dat betekent dat hiervoor uw eigen risico wordt gebruikt. Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage. Voor het jaar 2026 is dit door de overheid vastgesteld op €135,00 (tot 16 jaar €67,50). U betaalt deze eigen bijdrage per paar schoenen. Het overige deel betaalt uw zorgverzekering. Van Gils Footcare regelt uw declaratie bij uw zorgverzekering.



Ervaart u tijdens het dragen van uw schoenen problemen, zoals drukplekken, meldt u zich dan zo snel mogelijk bij ons.

Openingstijden

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Huisbezoek mogelijk in overleg. Bezoek ons op één van onze spreekuurlocaties bij u in de buurt. Voor een overzicht gaat u naar onze website: www.vangilsfootcare.nl



SEMH
erkend leverancier

nvos **orthobanda**
vrijheid in beweging



VOLG ONS OP
facebook



VOLG ONS OP
Instagram

Contactgegevens

Regio Leiderdorp
Tel. 071 – 301 63 51
Regio Oisterwijk
Tel. 013 – 513 05 99

Of stuur ons een e-mail:
info@vangilsfootcare.nl