



Productinformatie Orthopedische voorzieningen aan confectieschoeisel

Met de grootste zorg,
passie en vakmanschap

Op weg naar een aanpassing aan uw schoenen (OVAC)

U heeft een medische indicatie ontvangen van uw behandelend arts voor een aanpassing aan uw schoenen. Vaak kan een orthopedische voorziening zoals een afwikkeling, hakverhoging of zoolverstijving al een groot verschil maken en een oplossing bieden voor uw voetklachten.



De eerste afspraak

Bij de eerste afspraak bespreken we samen met u uw klachten en doen we een zorgvuldig voetonderzoek. Na dit onderzoek zullen wij uw eigen schoenen beoordelen op bruikbaarheid voor een bepaalde voorziening of aanpassing. De voorzieningen kunt u niet uit of van de schoenen halen. Het is daarom belangrijk om samen met uw orthopedisch schoenmaker te bepalen welke schoenen het meest geschikt zijn voor de nodige aanpassing.



De tweede afspraak

De levertijd voor de aanpassingen aan uw schoenen bedraagt 1 á 2 weken. Tijdens deze afspraak zal de functionaliteit gecontroleerd worden. We horen dan natuurlijk graag wat uw eerste indruk is. Het zal waarschijnlijk even wennen zijn.



Wat we u verder **nog graag vertellen**



Wisselen

Uw schoenen gaan langer mee als u ze regelmatig wisselt met een ander paar schoenen. Schoenen nemen transpiratievocht op en moeten daarom af en toe 'luchten'. U komt 3 maanden na aanschaf van het allereerste paar schoenen in aanmerking voor een wisselpaar. U kunt dan aan een ander paar schoenen dezelfde aanpassingen laten doen. Op deze manier kunt u regelmatig van schoenen wisselen, waardoor u langer plezier heeft van uw schoenen. Wij adviseren om elke dag te wisselen van schoenen. Afhankelijk van uw zorgverzekering mag u na 15-18 maanden na aflevering van het eerste paar, nog een paar laten aanpassen. Zo heeft u altijd 2 paar adequate schoenen.



Onderhoud en reparatie

Regelmatig poetsen (minimaal 1 keer per 2 weken) houdt het leer van uw schoenen mooi en soepel. Voor het poetsen van glad leer gebruikt u een schoencrème. Suède en nubuck kunt u borstelen met een suèdeborstel of nubuckblokje. Daarna spuit u de schoenen in met een beschermende spray. Zet uw schoenen nooit bij of op de verwarming, maar laat ze drogen bij kamertemperatuur. Heeft u last van transpirerende voeten? Was dan elke dag uw voeten en trek schone katoenen of wollen kousen/sokken aan. Laat de hakken en/of zolen van uw schoenen op tijd vervangen. Doorlopen op versleten hakken of zolen kan onherstelbare schade aan de schoenen aanrichten.



Vergoeding

Aanpassingen aan uw confectieschoenen worden geheel door uw zorgverzekering vergoed, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan. De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering. Dat betekent dat hiervoor uw eigen risico wordt gebruikt. Uw zorgverzekeraar kan een clustertarief hanteren. Hierdoor is het soms voordeliger om de kosten zelf voor uw rekening te nemen. Uw orthopedisch schoenmaker vertelt u daar graag meer over. Van Gils Footcare regelt vervolgens uw declaratie bij uw zorgverzekering.



Ervaart u tijdens het dragen van uw schoenen problemen, zoals drukplekken, meldt u zich dan zo snel mogelijk bij ons.

Openingstijden

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Huisbezoek mogelijk in overleg. Bezoek ons op één van onze spreekuurlocaties bij u in de buurt. Voor een overzicht gaat u naar onze website: www.vangilsfootcare.nl



Contactgegevens

Regio Leiderdorp
Tel. 071 – 301 63 51
Regio Oisterwijk
Tel. 013 – 513 05 99

Of stuur ons een e-mail:
info@vangilsfootcare.nl